


beurer

BF 990 WIFI






LV Diagnostikas svāri
Lietošanas instrukcija 4



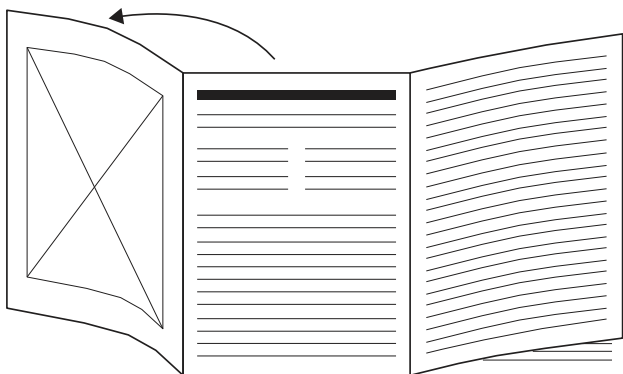

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiet 3. lappusi.

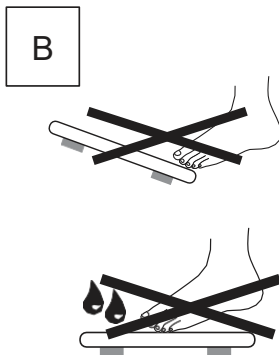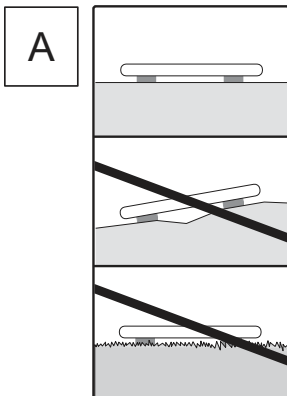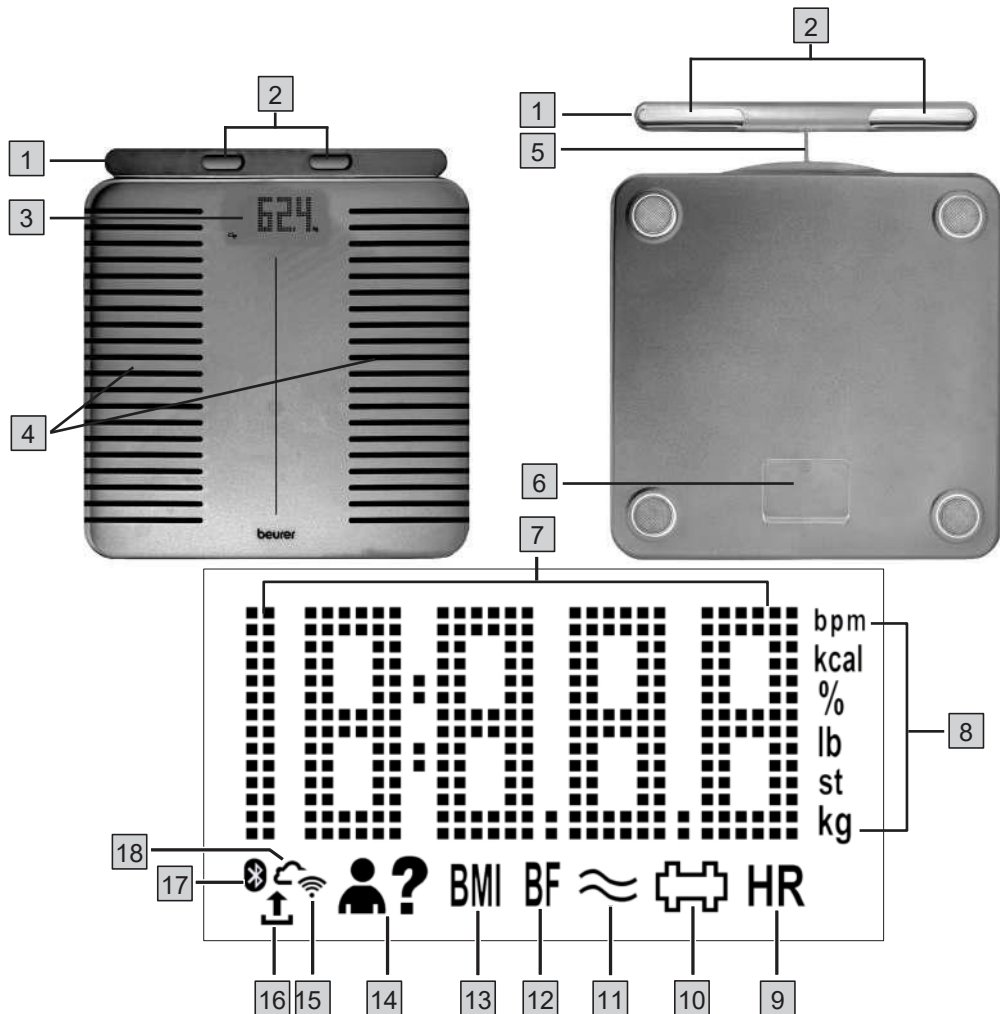



Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus turpmākai atsaucei. Dariet lietošanas pamācību pieejamu citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nodrošiniet lietošanas instrukciju arī nākamajam lietotājam.

Saturs

1. Komplektācija.....	4
2. Zīmes un simboli.....	4
3. Brīdinājumi un drošības piezīmes.....	5
4. Ierīces apraksts.....	5
5. Lietošana.....	6
5.1 Ierīces lietošana.....	6
5.2 Svaru lietotāju dzēšana.....	7
5.3 Svara mērvienības maiņa.....	7
6. Kā rīkoties, ja ir radušās problēmas??	
6.1 Paziņojumi.....	7
6.2 WIFI/Bluetooth® savienojuma problēmas.....	8
7. Tīrīšana un apkope.....	8
8. Utilizācija.....	8
9. Tehniskie dati.....	9
10. Garantija.....	9

1. IEKĻAUTS PIEGĀDĒ

Pārbaudiet, vai ierīces iepakojums nav bojāts, un pārliecinieties, ka iepakojumā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka viss iepakojuma materiāls ir noņemts. Ja rodas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirdzotāju vai norādīto servisa centru.

- 1 diagnostikas vannas istabas svari
- 3 AAA tipa baterijas, 1,5 V
- 1 šīs lietošanas instrukcijas eksemplārs

2. ZĪMES UN SIMBOLI

Uz ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tipa plāksnītes ir izmantoti šādi simboli:

	Ievērojiet lietošanas norādījumus
	Elektronisko ierīci aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem
	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai A= materiāla saīsinājums, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasas, 20-22 = papīrs un kartons
	CE marķējums Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības un valsts direktīvu prasībām.
	Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme
	Produkti uzskatāmi atbilst EAEU Tehnisko noteikumu prasībām
	Ražotājs
	Noņemiet iepakojuma elementus no ierīces un utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Importētājs

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, pastāv nāves vai nopietnu traumu gūšanas risks.

UZMANĪBU

Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, var rasties nelielas vai nebūtiskas traumas.

PIEZĪME

Norāda uz potenciāli kaitīgu situāciju. Ja no tās neizvairās, ierīce vai kaut kas tās tuvumā var tikt bojāts.



Informācija par produktu
Piebilde par svarīgu informāciju



Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar medicīniskiem implantiem (piemēram, elektrokardiostimulatoriem), jo tas var ietekmēt to funkcionalitāti.

3. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS

Paredzētais lietojums

Ierīce ir paredzēta tikai cilvēku svēršanai un personīgās fiziskās sagatavotības datu reģistrēšanai. Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai, nevis medicīniskiem vai komerciāliem mērķiem. Ierīci drīkst izmantot tikai tāda nolūkā, kādam tā ir paredzēta, un tāda veidā, kā norādīts lietošanas pamācībā.

BRĪDINĀJUMS

- Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar medicīniskiem implantiem (piemēram, elektrokardiostimulatoriem), jo tas var ietekmēt to funkcionalitāti.
- Neizmantojiet ierīci grūtniecības laikā.
- Apgāšanās risks! Nekad nenovietojiet svarus uz nelīdzsvara virsmas (skatīt attēlu ). Nekāda gadījumā nekāpiet uz svaru ārējās malas tikai vienā svaru pusē (skatīt attēlu ).
- Paslīdēšanas risks! Nekāpiet uz svariem ar mitrām pēdām (skatīt attēlu ). Nekāpiet uz svariem, ja to virsma ir mitra. Nekāpiet uz svariem ar zekēm.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai Beurer klientu apkalpošanas dienests vai pilnvaroti mazumtirgotāji. Nekad neatveriet svarus saviem spēkiem.

Piezīmes par rīkošanos ar baterijām

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot precizitāti (+ / -). Nepakļaujiet baterijas ūdens iedarbībai. Vienmēr izvēlieties pareizo bateriju veidu.
- Novērsiet īssavienojuma veidošanos starp baterijām vai bateriju nodalījuma kontaktiem.
- Baterijas ir aizliegts uzlādēt, piespiedu kārtā izlādēt, karsēt, izjaukt, deformēt, iekapsulēt vai modificēt.
- Baterijas aizliegts metināt vai lodēt.
- Nekad neievietojiet ierīcē vienlaikus dažādu ražotāju, ietilpības (jaunas un lietotas), izmēra vai tipa baterijas.
- Sprādziena risks! Iepriekš minēto norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus, bateriju pārkaršanu, noplūdi, gāzes izplūdi, salūšanu, eksploziju vai ugunsgrēku.
- Ja radusies baterijas noplūde, uzvelciet aizsargcimdus un iztīriet bateriju nodalījumu ar sausu drānu.
- Ja āda vai acis saskaras ar bateriju šķidrumu, skartās vietas noskalojiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nosmakšanas risks! Glabājiet baterijas maziem bērniem nepieejamā vietā. Ja norītas, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Bateriju norīšana var izraisīt smagus iekšējus apdegumus un nāvi.
- Nekad neļaujiet bērniem nomainīt baterijas bez pieaugušu uzraudzības.

UZMANĪBU

- Uzglabājiet baterijas tālu no metāla priekšmetiem labi vēdināmā, sausā un vēsā vietā.
- Nekad nepakļaujiet baterijas tiešai saules staru vai lietus iedarbībai.
- Bateriju atrašanās vidē ar ļoti augstu temperatūru vai zemu gaisa spiedienu var izraisīt uzliesmojošu šķidrumu un gāzu eksploziju vai noplūdi.
- Izņemiet baterijas no ierīces, ja to neizmantosiet ilgāku laiku. Neizmantojiet ierīci, ja baterijas nodalījuma vāks vairs nav pareizi aizvērts.
- Nekavējoties un pareizi utilizējiet izlādējušās baterijas. Nekad neizmetiet baterijas ugunī vai karstā krāsnī.

Informācija par sistēmu



Svarus var izmantot no 10 gadu vecuma. Svarus var pilnībā izmantot tikai kopā ar "beurer HealthManager Pro" lietotni un tiešsaistes kontu.

4. IERĪCES APRAKSTS

Attiecīgās ilustrācijas ir 3. lappusē.

Diagnostikas sviri

- 1 Rokas ierīce
- 2 Rokas ierīces elektrodi Displejs
- 3 Pēdu elektrodi ar ITO pārklājumu (indija alvas oksīds)
- 5 Rokas ierīces kabelis
- 6 Bateriju nodalījums

Displejs

- 7 Izmēritā vērtība Mērvienība
- 8 Sirdsdarbības ātrums/pulss sitienos/min
- 9 Muskuļu procentuālais daudzums %
- 11 Ķermeņa ūdens saturs %
- 12 Ķermeņa tauku procentuālais daudzums %
- 13 Ķermeņa masas indekss
- 14 Nezināms lietotājs mērījumu laikā
- 15 Sviri savienoti ar Wi-Fi
- 16 Mērījumu datu pārsūtīšana
- 17 Sviri savienoti ar Bluetooth®
- 18 Sviri savienoti ar mākonī/serveri

5. LIETOŠANA

5.1 Ierīces lietošana

1. SOLIS: bateriju ievietošana

- ievietojiet trīs komplektācijā iekļautās 1,5 V AAA baterijas bateriju nodalījumā [6] svaru apakšpusē. Kad ievietojat baterijas, pārliecinieties, ka tiek ievērota pareiza polaritāte (+/-).

2. SOLIS: Svaru atrašanās vietas izvēle

- Novietojiet svarus uz līdzenas un stabilas virsmas. Nenovietojiet svarus uz paklāja!

3. SOLIS: Svaru lietotāju izveidošana "beurer HealthManager Pro" lietotnē ar tiešsaistes kontu

"beurer HealthManager Pro" lietotne ir nepieciešama izmērīto vērtību datu pārsūtīšanai un papildu vērtību parādīšanai.

Svariem ir 8 svaru lietotāji, kas ļauj saglabāt dažādu jūsu ģimenes locekļu datus. Jūs varat izmantot "beurer Health- Manager Pro" lietotni, lai ērti iestatītu atsevišķus lietotnes lietotājus un tiem atbilstošo svaru lietotāju, izmantojot viedtālruni. Rīkojieties šādi:

- Lejupielādējiet bezmaksas "beurer HealthManager Pro" lietotni no App Store (iOS) vai no Google Play (Android™).



Skenējiet šeit, lai piekļūtu "beurer HealthManager Pro" lietotnei.


4. SOLIS: svēršanās.



Anaīlītiskais mērījums ir iespējams tikai uzskāpjot uz svariem ar kailām kājām un izmantojot rokas ierīci [1]. Citādi tiks veikts tikai svara mērījums, kas tiks piešķirts attiecīgajam svaru lietotājam.

1. Uzskāpiet uz svariem kailām kājām. Nostāieties


uz pēdu elektrodiem [4] ar abām kājām un sadaliet svaru vienmērīgi. Svari ieslēdzas automātiski.

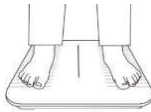

2. Turiet rokas ierīci [1] gurnu augstumā un izstiepiet rokas.



3. Novietojiet abus īkšķus uz abiem ovālajiem rokas ierīces elektrodiem [2]. Ar pārējiem pirkstiem satveriet pagarināto elektrodu aizmugurējo daļu. Nesatveriet rokas ierīci pārāk cieši [1].

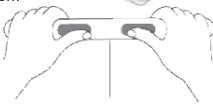

4. Displejā [3] tiek parādīts jūsu ķermeņa svars. Pēc tam automātiski jāparādās noteiktajam svaru lietotājam (piemēram, "U: 1" 1. svaru lietotājam).



- Ja automātiskā svaru lietotāju atpazīšana nedarbojas, jūs varat piešķirt savu mērījumu sev "beurer HealthManager Pro" lietotnē.

5. Tālāk norādītās vērtības parādīsies viena pēc otras.

BMI	Ķermeņa masas indekss (veselīga vērtība ir 18,5 – 25)
BF	Ķermeņa tauku procentuālais daudzums (veselīga vērtība ir 16 – 28% sievietēm un 11 – 23% vīriešiem)
	Ķermeņa ūdens saturs % (veselīga vērtība ir 45 – 60% sievietēm un 50 – 65% vīriešiem)
	Muskuļu procentuālais daudzums (veselīga vērtība ir 27 – 43% sievietēm un 37 – 57% vīriešiem)
HR	Sirdsdarbības ātrums/pulss sitienos minūtē (veselīga vērtība ir 50 – 100 sitieni minūtē miera stāvoklī). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mērījums neatbilst definētajam miera stāvokļa pulsam, jo mērījums notiek stāvot kājās, nevis sēžot vai gulot. Arī šī iemesla dēļ, veicot atkārtotus mērījumus, vērtība var nedaudz atšķirties.



Precīzu pārskatu un visu vērtību aprakstu skatiet lietotnē vai BUJ vietnē: www.beurer.de

6. Nokāpiet no svariem.

7. Ja ir izveidots Bluetooth® vai WIFI savienojums un lietotāja mērījumi ir veiksmīgi reģistrēti (piemēram, U: 1), vērtības tiks pārsūtītas uz "beurer HealthManager Pro" lietotni. Par to liecina mērījumu datu pārsūtīšanas simbols [16]. Ja datus nevar pārsūtīt, katram lietotājam tiks saglabātas līdz 30 vērtībām. Tiklīdz savienojums ir izveidots, šīs vērtības tiks pārsūtītas kopā ar nākamajiem mērījumiem.

8. Svari izslēdzas automātiski.



- Ciktāl iespējams, sverieties katru dienu vienā un tajā pašā laikā (vislabāk no rīta), pēc tualetes apmeklējuma un tukšā dūšā.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehnisku iemeslu dēļ ir iespējamas mērījumu pielaišanas, jo šie svari nav kalibrēti izmantošanai profesionālā medicīniskā vidē.
- Šie svari darbojas pēc B.I.A. (bioelektriskās pretestības analīze) principa. Ja šis elektriskās pretestības mērījums tiek ņemts vērā gar blakus konstantēm un/vai atsevišķām vērtībām (vecums, augums, dzimums, aktivitātes līmenis), ir iespējams aprēķināt ķermeņa tauku procentuālo daudzumu un citus mainīgos lielumus organismā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar diagnostikas vannas istabas svariem aprēķinātās vērtības ir tikai aptuvenas ķermeņa medicīniski analītiskās vērtības. Tikai ārsts speciālists var precīzi noteikt ķermeņa tauku, ķermeņa ūdens, muskuļu procentuālo daudzumu un kaulu struktūru, izmantojot medicīniskas metodes (piemēram, datortomogrāfiju).



- Pieprasiet profesionālu konsultāciju no atbilstoši kvalificēta speciālista (piemēram, ārsta), ja veicat jebkādu ārstēšanu vai diētu, lai novērstu lieko svaru vai nepietiekamu svaru. Veselības mērījumi, kas noteikti, izmantojot svarus, var palīdzēt kvalificētiem speciālistam diagnosticēt noteikšanu.
- Neprecīzi vai neticami rezultāti var rasties, nosakot ķermeņa tauku saturu bērniem, sportistiem vai cilvēkiem ar medicīniskiem/fiziskiem ierobežojumiem (piemēram, tūskas simptomiem, osteoporozī, cilvēkiem, kuri lieto auto dīvaskulārus medikamentus vai medikamentus, kas maina asinsvadu sistēmu, cilvēkiem ar būtiskām anatomiskām anomālijām kājās).
- Neprecīzi vai neticami rezultāti var rasties, nosakot sirdsdarbības ātrumu, ja ir nepietiekama asins cirkulācija kājās, pārmērīga vēnu stāze, asinsvadu sašaurināšanās vai intensīvas kāju tūskas.

5.2 Svaru lietotāju dzēšana

Jūs varat izdzēst atsevišķus svaru lietotājus "beurer HealthManager Pro" lietotnē.

5.3 Svara mērvienības maiņa

Jūs varat mainīt svara vienību "beurer HealthManager Pro" lietotnē.

6. KĀ RĪKOTIES PROBLĒMU GADĪJUMĀ?

6.1 Ziņojumi

Displejs	Cēlonis/risinājums
Neatbilstība svaram	Nepareizs nulles punkts (piemēram, atrašanās vietas maiņas vai temperatūras svārstību gadījumā): Islaicīgi piespiediet svarus, līdz tiek parādīts pašreizējais svars, pēc tam noņemiet kāju.
	Svari novietoti uz paklāja vai nelīdzenas pamatnes: virsmai jābūt cietai un līdzenai.
	Ciktāl iespējams, sverieties katru dienu vienā un tajā pašā laikā (vislabāk no rīta), pēc tualetes apmeklējuma un tukšā dūšā.
mirgo	Svarus var savienot ar lietotni, izmantojot Bluetooth® : nemēģiniet izveidot savienojumu, izmantojot Bluetooth® iestatījumus viedtālrunī, izmantojiet tikai lietotni.
PAir	Bluetooth® vienu reizi jāļauj izveidot savienojums ar viedtālruni. Ja nepieciešams, pārbaudiet paziņojumu viedtālrunī un ļaujiet izveidot savienojumu ar Bluetooth® .
UnSt	Šis svara mērījums bija nestabils: Mērījuma laikā stāviet nekustīgi.
U: -- /	Svari nevarēja piešķirt mērījumu svaru lietotājam: Ja automātiskā svaru lietotāju atpazīšana nedarbojas, atveriet "beurer HealthManager Pro" lietotni.
BF--	Ķermeņa tauku procentuālais daudzums ir ārpus izmēramā diapazona: pārbaudiet lietotāja datus vai mainiet aktivitātes līmeni. Pretējā gadījumā diagnostiskās vērtības nevar noteikt to zemās informatīvās vērtības dēļ.

Displejs	Cēlonis/risinājums
"no HR"/HR--	Sirdsdarbības ātruma mērījums nav izdevies: atkārtojiet mērījumu ar pareizu satvērienu Satveriet rokas ierīci un stāviet ar basām kājām nekustīgi, kamēr tiek veikts svara mērījums un līdz sirdsdarbības ātruma mērījums ir pabeigts. Nenokāpiet no svariem un neizkustieties pārāk ātri.
oLd	Ir pārsniegts maksimālais svars 180 kg. Ķermeņa svars nedrīkst pārsniegt 180 kg.
BAt/Lo	Baterijas ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.
Err1	Nepareiza parole atlasītajam WIFI tīklam/SSID/maršrutētajam.
Err2	Jūsu maršrutētajam nav interneta piekļuves. Serveris nav sasniedzams.
Er3...	Programmatūras atjaunināšana neizdevās: lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
utd	Programmatūra ir atjaunināta.
	WIFI un savienojums ar mākonī/serveri veiksmīgi izveidots
	Mērījums tiek pārsūtīts
	Ķermeņa masas indekss
	Ķermeņa tauku procentuālais daudzums %
	Ķermeņa ūdens saturs %
	Muskuļu procentuālais daudzums %
	Sirdsdarbības ātrums/pulss sitienos minūtē

6.2 WIFI/Bluetooth® savienojuma problēmas

Problēma	Cēlonis/risinājums
Nav Bluetooth® savienojuma  Simbols 17 nav redzams displejā	Ierīce ir ārpus Bluetooth® diapazona. Minimālais attālums atklātā telpā ir aptuveni 10 m. Sienas un griesti samazina diapazonu. Citi radioviļņi var traucēt pārraidi. Tāpēc novietojiet svarus pie ierīcēm, piemēram, mikroviļņu krāsnīm vai indukcijas plītnī. Ideālā gadījumā izslēdziet citas Bluetooth® ierīces, kas atrodas diapazonā. Nav Bluetooth® savienojuma ar lietotni. - Izslēdziet un atkal ieslēdziet Bluetooth® savā viedtālrunī. Pārliecinieties, ka svāri netiek pievienoti, izmantojot operētājsistēmas Bluetooth® iestatījumus. Ja nepieciešams, noņemiet ierīci no ierīču saraksta Bluetooth® iestatījumos un pēc tam izmantojiet "beurer HealthManager Pro" lietotni. - Pilnībā aizveriet lietotni (tostarp neļaujiet tai darboties fonā). Izslēdziet un atkal ieslēdziet viedtālruni. - Lai izveidotu savienojumu ar svāriem, pārbaudiet viedtālruna statusa joslu, lai sāktu savienošānu pāri/savienošānu. Piezīme: Bluetooth® savienojums ir nepieciešams tikai sākotnējai lietošanai un svaru iestatījumu mainīšanai. Lai gan mērījumus var pārsūtīt arī caur Bluetooth®, mērījumu datu pārsūtīšana notiks parastajā standarta režīmā, izmantojot WIFI (bez Bluetooth®).
Nav savienojuma ar serveri/mākonu  Simbols 18 nav redzams displejā	Pārbaudiet, vai maršrutētājam ir interneta savienojums. Pārbaudi ierīces iestatījumus lietotnē.
Nav savienojuma ar maršrutētāju  Simbols 15 nav redzams displejā vai „no  “	Nepareiza parole - Atveriet lietotni. Atveriet svaru iestatījumu lietotnē. - Interneta maršrutētāja WIFI radio tīklam/tīkla nosaukumam (SSID) un parolei (WIFI tīkla atslēgai) ir jāsakrīt. Atkārtoti ievadiet paroli/tīkla atslēgu. Pārliecinieties, ka parole/tīkla atslēga atbilst tai, kas iestatīta jūsu izvēlētajam maršrutētāja/WIFI nosaukumam. Lūdzu, atcerieties, ka parole ir reģistrējama. Lai uzzinātu vairāk, skatiet tehniskos datus sadaļā "Savienojamība". Nepareizi maršrutētāja iestatījumi Ierīce savienojas ar 2,4 GHz tīklu. Ierīce nevar izveidot savienojumu ar 5 GHz vai 6 GHz tīklu. Pārbaudiet maršrutētāja iestatījumus, lai redzētu, vai tiek atbalstīts 2,4 GHz (principā ir iespējama jauktā 2,4 GHz/ 5 GHz darbība). Neizmantojiet mobilo WIFI tīklāju, jo tas var nebūt vienmēr pieejams. Izvairieties no viesu tīkliem.

Problēma	Cēlonis/risinājums
Mērījumi netiek nosūtīti  Simbols 16 nav redzams displejā	Nav WIFI/Bluetooth® savienojums: Bluetooth® simbols 17 vai WIFI un mākoņa simboliem 14 + 13 jābūt redzamiem, lai veiktu mērījumu. Ja nepieciešams, samaziniet attālumu starp svāriem un WIFI maršrutētāju. Pārbaudiet WIFI tīkla ierīces iestatījumus "beurer HealthManager Pro" lietotnē. Pārbaudiet, vai svaru Bluetooth® un WIFI iestatījumi ir deaktivizēti. Nav mērījumu svaru lietotājam: Lietotnes iestatījumos svāriem jāpiešķir lietotāja atmiņa (piemēram, U: 1), kas mērījuma laikā parādās svaru displejā. Var pārsūtīt tikai šos mērījumus. Tāpēc, veicot mērījumus, pārbaudiet, ka svaru displejā un lietotnes iestatījumos ir norādīts attiecīgais lietotājs.

7. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Laiku pa laikam notīriet svaru virsmu ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet svarus atkārtoti, kamēr virsma nav pilnībā nožuvusi.

⚠ UZMANĪBU

- Neizmantojiet abzīvrūs tīrīšanas līdzekļus.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet svarus ūdenī. Nekādā gadījumā neskaļojiet svarus zem tekoša ūdens.
- Nelieciet uz svāriem nekādus priekšmetus, kad tie netiek izmantoti.
- Sargājiet svarus no triecieniem, mitruma, putekļiem, ķīmikālijām, krasām temperatūras izmaiņām un tuvumā esošiem siltuma avotiem (krāsnīm, sildītājiem).

8. UTILIZĀCIJA

PIEZĪME

Utilizējot baterijas, glabājiet baterijas ar dažādām elektroķīmiskām sistēmām atsevišķi.

Vides apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos, kad to vairs nevar izmantot. Utilizējiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā jūsu valstī. Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu utilizāciju.

Utilizējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbildīgas par atkritumu likvidēšanu. Nolietoto ierīču savākšanas punktu atrašanās vietu var noskaidrot, piemēram, vietējās vai pašvaldības iestādēs, vietējos atkritumu savākšanas uzņēmumos vai pie sava mazumtirgotāja.

Izlietotās baterijas aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Utilizējiet tās pie sava elektronikas mazumtirgotāja vai vietējā pārstrādes punktā. Jums ir juridisks pienākums to darīt.

Piezīme: Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas: Pb = baterija satur svini, Cd = baterija satur kadmiju, Hg = baterija satur dzīvsudrabu.



9. TEHNISKIE DATI

Modelis:	BF 990 WIFI
Izmēri:	310 x 336 x 29 mm
Svars:	2,23 kg
Mērvjumu diapazons:	180 kg / 396 lb / 28 st
Displejs	kg: 0,1 kg lb: 0,2 lb st: 0-19 st = 0,2 lb; 20-28 st = 1 lb / 0.1% / 1 bpm
Atkārtotšanas precizitāte:	max. ± 0.4 kg
Absolūtā precizitāte:	max. ± (0.5% + 0.1 kg), e.g. 80 kg: max. ± 0.5 kg
Baterija:	3 AAA tipa, 1.5 V
Savienojamība:	Iestatīšana un iestatījumi, izmantojot <i>Bluetooth®</i> zema enerģijas patēriņa tehnoloģiju. Datu pārsūtīšanu vēlams veikt, izmantojot WI-FI vai alternatīvi, izmantojot <i>Bluetooth®</i> zema enerģijas patēriņa tehnoloģiju. WIFI sistēmas prasības: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Šifrēšanas sistēmas prasības: WPA2-PSK, WPA3-PSK WIFI frekvenču josla: 2412 – 2472 MHz, raidīšanas jauda maks. 14,05 dBm. <i>Bluetooth®</i> frekvenču josla: 2402 – 2480 MHz, raidīšanas jauda maks. 8,77 dBm.
Sistēmas prasības un saderīgo ierīču saraksts "beurer HealthMan- ager Pro" lietotnei	

Var tikt veiktas tehniskas izmaiņas

*Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības direktīvu prasībām.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis produkts atbilst Eiropas RED direktīvai 2014/53/ES.
Šī izstrādājuma CE atbilstības deklarācija ir pieejama šeit:
<https://www.beurer.com/conformity>

10. GARANTĪJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta garantijas brošūrā.

Izplatītājs:
Sandmani Grupi AS,
Laki pöik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee

Iespējamās kļūdas un izmaiņas.