

ALKOMEETRI Alcoscan®Secret KASUTUSJUHEND

Täname Teid, et ostsite alkomeetri ALCOSCAN®Secret (tehniline nimetus Alcoscan®5200)!

Alcoscan®5200 on uus alkomeeter, mis suudab täpselt määrata joovet vahemikus 0,00-4,00‰ (ehk g/L ehk grammi alkoholi liitris veres).

Paljudest teistest alkomeetritest eristavad antud mudelit: automaatne testisiku puhutava õhu piisavuse kontroll ning võimalus lisaks originaalhuulikele kasutada seda ka näiteks joogikõrrega. Tänu nendele omadustele ja täpsele andurile, on alkomeeter Alcoscan®5200 usaldusväärne seade, kui soovite määrata kas enda või teiste isikute võimaliku joobe suurust!



KASUTUSJUHEND

NB! Teie alkomeeter kasutab hetkel uusimat, kõrgelektiivset alkoholiandurit, mis on väga tundlik. Anduri kõrge tundlikkuse tõttu on soovitatav juhil, kui Te ei ole alkomeetrit mõnda aega kasutanud, enne testimist lasta alkomeetril läbi teha 1-2 soojenemistsükli. Seda tegemata jättes võite saada esimesel puhumisel tegelikust kõrgema näidu.

1. Paigaldage alkomeetri huulikuvasse huuliku või selle puudumisel joogikõrs.
 2. Lülitage alkomeeter sisse, vajutades seadme küljel olevale nupule umbes 1 sekund.
 3. Alkomeeter alustab automaatset töök ettevalmistusprotseduuri, mille käigus soojendatakse ja stabiliseeritakse mootesensor. Selle käigus vahelduvad ekraanil numbrid. Töök ettevalmistus võtab aega tavaliselt ca 25 sekundit, kuid võib olla ka pikem.
 4. Kui ekraanil paremas nurgas süttib number 0 ja süttib indikaator "READY" (ingl.k. *valmis*) ning kostub helisignaal (2 piisku), on alkomeeter töök valmis.
 5. Isik, kelle joovet mõdetakse, peab tõmbama kopsud õhku täis ning puhuma seejärel (tugevusega, nagu viilistades) alkomeetrisse vähemalt 4 sekundit. Testi algusest annab tunnistust pidev helisignaal ning 2 lühikest piisku tähendavad testimise lõppu.
- Märkus:**
- ✓ Kui testisik ei puhu alkomeetrisse piisavalt (tähtis on nii tugevus kui pidevus – puhuda tuleb järjest), siis ei ole võimalik tõest joobenäitu leida ja ekraanile ilmub kiri "Flo" (ingl.k. *puhur*). Sel juhul tuleb uuesti vajutada seadme sisselülitisnupule ning testi korrata.
 - ✓ Kui testimist ei alustata 20 sekundi jooksul peale seda, kui alkomeeter on jõudnud töörežiimi (süttinud lamp READY), kuvatakse ekraanile "Out" (ingl.k. *välja*) ning alkomeeter lülitub automaatselt välja.
6. Peale testimise edukat lõppu, alkomeeter analüüsib (ekraanil liigub vasakult paremale number 0) testisiku hingeõhku ning ekraanile kuvatakse 15 sekundiks joobe suurus promillides.
 7. Peale mõõtmistulemuse kuvamist lülitub alkomeeter automaatselt välja.

Kui soovitakse testi korrata või testida teist isikut, tuleb alkomeeter uuesti sisse lülitada (automaatne ettevalmistussüklil võib olla sel juhul lühem, 10 sekundit). Juhul kui viimasel mõõtmisel (viimase 5 minuti jooksul) tuvastati joove, kuvatakse esmalt hetkeks viimane joobenäit. Kui viimane mõõtmine tuvastas joobe, soovime enne uut mõõtmist oodata paar minutit.

teated ekraanil:

- ✓ Kui ekraanil näete kirja "bat" (ingl.k. "patarei"), on patareid tühjad ning need tuleb vahetada. Kasutada tohib ainult alkaalseid (alkaline) 1,5V AA-tüüpi patareid (MN1500,LR6)
- ✓ Kui ekraanile ilmub kiri "CAL", vajab mõõteandur plaaniväliselt hooldust/kalibreerimist. Sel juhul tuleb alkomeeter kalibreerimiseks toimetada lähimasse laborisse. Laborite loetelu leiate aadressilt www.alkomeeter.com Üldjuhul tuleks alkomeetrit kalibreerida iga 4-6 kuu järel, kuid see sõltub alkomeetri töötingimustest ning mõõtmisagedusest.
- ✓ Kui ekraanile ilmub "Flo", ei ole testisiku puhumine kas piisav või piisavalt pidev. Sel juhul tuleb testimist korrata.

NB! Vastavalt EV Liiklusseaduse §69 lg.5:

" Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja maastikusõidukijuhi ühes grammis veres ei tohi olla alkoholi 0,20 milligrammi või rohkem või ühes liitris väljahingatavas õhus 0,10 milligrammi või rohkem.."

Käesolev alkomeeter mõõdab joobe suurust promillides (milligrammi alkoholi grammi vere kohta). Kui soovite teada joovet väljahingatavas õhus milligrammiühikes, jagage seadme näit kahega.

Toote tehnilised andmed:

<i>Mõõtmisulatus:</i>	0,00-4,00 ‰ promilli (mõõtetäpsus +/- 0,05‰ tulemil 0,5‰)
<i>Toide:</i>	2x 1,5V AA/LR6 alkaalset (alkaline) patarei
<i>Ekraan:</i>	Digitaalne (numbrilise näiduga) LED ekraan
<i>Testi kestvus</i>	4 sekundit puhumist
<i>Töök valmisoleku aeg</i>	valmisolek saavutatakse umbes 25 sekundi jooksul, max valmisoleku saavutamise aeg on 100 sekundit.
<i>Mõõtmed:</i>	ca 109x44x18mm
<i>Kaal</i>	93g koos patareidega
<i>EU heakskiit:</i>	CE, DOT
<i>Kalibreerimine:</i>	laboritingimustes BAC-simulaatoriga
<i>Komplekti kuuluvad:</i>	Alkomeeter Alcoscan®5200, kasutusjuhend, patarei, huulikud (5 tk.)

TÄHTIS!

- ✓ Kui Te ei kasuta alkomeetrit pikemat aega, eemaldage palun patareid ning hoidke seadet kuivas keskkonnas, kaitstuna niiskuse, otse päikesevalguse ja füüsiliste kahjustuste eest. Alkomeetri anduri töövoime pikendamiseks on soovitatav alkomeeter vähemalt kord 2 nädala jooksul sisse lülitada.
- ✓ Tõepärase joobenäidu saab alkomeetriga mitte varem kui 30 minuti möödumisel pärast alkoholi tarvitamist, kuna niikaua võib kuluda aega alkoholi jõudmiseks verre. Varasemal mõõtmisel võivad mõõtetulemit mõjutada suus veel leiduvad alkoholiurud.
- ✓ Vältige igal juhul alkomeetri kokkupuudet vedelikega ning kondensvee tekkimist.
- ✓ Ärge kunagi puhuge alkomeetrisse sigaretsuitsu – see võib põhjustada sensori purunemise.
- ✓ Alkomeetri kasutamisel väga saastunud õhuga ruumis võib see põhjustada valenäitu, kuna ka käärimisostakeses võib sisalduda alkoholi. Samuti võib mõõtmisvoimet kahjustada täissüüetatud ruumis kasutamine.
- ✓ Alkomeetrisse tohib puhuda ainult läbi huuliku. Vale kasutamine võib seadme lõhkuda.
- ✓ Kuigi käesolev alkomeeter on täpne, ärge kasutage seda kunagi "joo ja sõida" seadmena. Inimorganismi alkoholitalluvus on väga individuaalne ning ohutut alkoholihoovet ei ole olemas. Autot ei tohi juhtida ka juhul kui alkomeeter joovet ei näita, kuid Teie enesetunne või tervislik seisund ei võimalda auto ohutut juhtimist.

Garantii

Käesolevale seadmele kehtib tootjapoolne kuuekuuline garantii alates ostukuupäevast, mida Eestis ja Lätis täidavad regionaalse ainuesindajana Rovico ning tema poolt volitatud hoolduslaborid. Tarbijale müügi korral on tarbijal kõik minimaalsed EV seadustest tulenevad õigused garantii kehtivuse osas. Müüja ja tootja vastavus asja lepingutingimustele mittevastavuse eest piirneb Võlaõigusseaduses sätestatud minimaalse vastutusega. Ostukuupäeva kinnituseks on arve või kassatsekk või käesoleval juhendil täidetud garantiitunnistus, mille saite seadme ostmisel. Garantii vahetuseks on vajalik ka käesolev juhend ja seadme pakend. Seadet ei tohi omavoliliselt avada, selle nõude eiramine, samuti seadme avamine selleks mittevõlitatud teeninduskohas lõpetab garantii. Alkomeetri andur on oma olemuselt kuluv detail ja võib puruneda ka kui alkomeeter on jäetud õigeaegselt hooldamata. Garantii ei laiene patareidele ega kahjustustele, mis on tingitud seadme väärast kasutamisest või hoidmisest (s.h. seadme füüsilised kahjustused, kalibreerimisvajaduse eiramine, niiskuskahjustused, kokkupuude sigaretsuitsu ja teiste tugevalõhnaliste gaasidega) ega kalibreerimisvajadusele.

Arvestades kondensvee tekkimise ohtu (millest tekkida võivad niiskuskahjustused ei kuulu garantii alla), ei ole soovitatav hoida käesolevat seadet külmas (alla +5°C). Kasutamise hetkel peab seadme temperatuur ületama +5°C.

Hooldus (Kalibreerimine ja justeerimine).

Tagamaks mõõtetulemi täpsust ja vältimaks anduri purunemist, tuleb alkomeetrit hooldada vähemalt iga 4-6 kuu järel ja ka iga 400 kasutuskorra järel ning kindlasti ka niipea kui ekraanile ilmub kiri Cal. Kalibreerimiseks pöörduge firmasse Rovico, Pärnu mnt.141, Tallinn. Tel 6515070. Kalibreerimine sisaldab Rovico laborites ka justeerimist. Teiste kalibreerimislaborite asukohad leiate aadressilt www.alkomeeter.com. NB! Seadet tohib kalibreerida ainult MTU Eesti Alkomeetrite Müüjate Liidu tunnustust omavates laborites.

Vastutus

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kuigi seade on täpne, ei saa selle näit olla ühelgi juhul tõendusmaterjaliks kohtus, kuna käesolev seade ei ole taadeldud. Kui seade näitab joovet ning Teil on vaja kasutada seda õiguslikes protsessides, laske palun joovet protokollida politseil, kes vajadusel korraldab veretestijooeekspertiisi.

NB! Ei seadme tootja, maaletooja ega edasimüüja ei saa ühelgi juhul olla vastutavad seadme näidust tulenevate tagajärgede eest!

Seadme komponendid on toodetud Lõuna-Koreas ning seade ise finaliseeritud ja müügieelselt kalibreeritud Eestis.

Seade vastab CE sertifitseerimisnõuetele. Seadet on tootja kinnitusele tunnustanud kasutuseks veretestiseelse indikaatorina ka USA Transpordiamet. (DOT)

Seadme maaletooja, finaliseerija ja turustaja, tootja esindaja:

ROVICO, Pärnu mnt.141, Tallinn www.alkomeeter.com

Käesolev alkomeeter omab Eesti Alkomeetrite Müüjate Liidu tunnustust ja heakskiitu.

GARANTIITUNNISTUS: (arve nr.) SEERIANUMBER: SNE.....

(kui see garantiitunnistus on täitmata, kehtib garantiina Rovico poolt kauba ostmisel väljastatud arve)

Müügikuupäev: ".....".....201...a..

päev

kuu

Müügiletteville tempel

Müüja allkiri:

Märkus: Käesolevat garantiitunnistust täites kinnitab müüja, et on volitatud antud toote maaletooja Rovico Büro OÜ nimel käesolevat garantiitunnistust täitma. Kui garantiiperioodi jooksul peaks seade vajama garantiiremonti, peab seadme ostja või omanik pöörduma garantiiremonti sooritamiseks kas Rovico poole tel 6515070. Garantiiperioodi pikkuseks on tootja poolt sätestatud kuus kuud alates seadme ostukuupäevast. Tarbijale müügi korral on tarbijal kõik minimaalsed EV seadustest tulenevad õigused garantii kehtivuse osas.

Garantii kehtib ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud mahus ja tingimustel.